

LIQUIBANDFIX8®

OPEN - FÜR DIE OFFENE HERNIENNETZFIXIERUNG

1.5g


VORBEREITUNGSSCHRITTE

01




Entnehmen Sie das Gerät aus der Verpackung und halten Sie es **während der Schritte 1 bis 5** mit der Spitze **SENKRECHT nach UNTEN**.

02

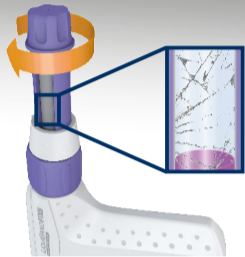

Drehen Sie den lilafarbenen distalen Kolben im Uhrzeigersinn, bis das Zerschneiden der Glasampulle zu hören und zu sehen ist. Der Kolben besitzt ein integriertes Sichtfenster, über das Sie überprüfen, ob der Klebstoff in das Gerät übertragen wurde. Dies dauert ca. 5 Sekunden.

03

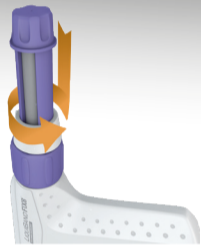

Schieben Sie das Röhrchen langsam in den Gerätegriff, drehen Sie es anschließend **ENTGEGEN dem Uhrzeigersinn BIS ZUM ANSCHLAG**, um die Anzeiger zueinander auszurichten (die Pfeile müssen übereinander stehen).

04




Drehen Sie nun das lilafarbene Drehrad **IM Uhrzeigersinn BIS ZUM ANSCHLAG**.

05



Bereiten Sie das Gerät vor, indem Sie den Auslöser drücken, bis ein Tropfen Kleber sichtbar ist. Wischen Sie überschüssigen Kleber, z.B. mit einer trockenen sterilen Kompresse, von der Spitze ab. Das Gerät kann jetzt zur Hernienrekonstruktion verwendet werden.

06

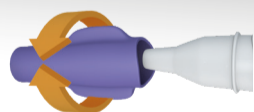

Vorbereiten des Geräts für den anschließenden topischen Wundverschluss

Drehen Sie die lilafarbene Spitze in beide Richtungen, um sie abzunehmen. Entsorgen Sie die abgenommene Spitze.

Bestellinformation

Artikelnummer FX002
LiquibandFIX8 OPEN - für die offene Hernienchirurgie
VE 6 Geräte

AFSMEDICAL 
we do care.

AFS MEDICAL GmbH | Medizinproduktehandel
Gewerbepark B17/II, Straße 1/3, 2524 Teesdorf, Österreich
T +43 2253 81801-0 | F +43 2253 81801-8
office@afs-medical.com | afs-medical.at



Advanced Medical Solutions
Western Wood Way,
Langage Science Park
Plymouth, PL7 5BG, Devon, UK
Tel: +44(0) 1752 209 955
Fax: +44(0) 1752 209 956
Email: info@liquiband.com

