


# Lone Star™ Retraktorsystem

Einfach im Handling, flexibel adaptierbar

Dieses selbsthaftende Retraktorsystem ist einfach in der Anwendung und verbessert deutlich die Sicht auf das Operationsfeld. Lone Star™ ist bei vielen unterschiedlichen chirurgischen, gynäkologischen und urologischen Eingriffen einsetzbar.


- Das OP-Personal kann andere Aufgaben wahrnehmen
- Egal, ob straffes oder weiches Gewebe gehalten werden soll, es steht eine Vielzahl an Retraktorringen und elastischen Haltern mit verschiedenen Retraktionshaken zur Verfügung, um das ideale OP-Setting zu definieren.
- Einwegprodukt

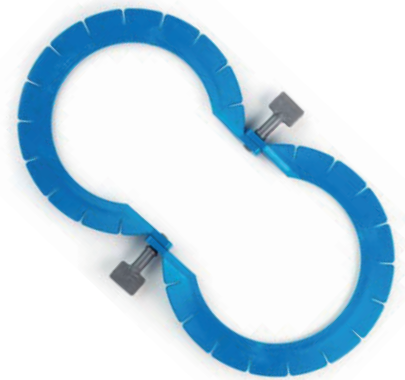

## Vorteile auf einen Blick


- Ungehindertes Blick auf das Operationsfeld

### Schritt 1

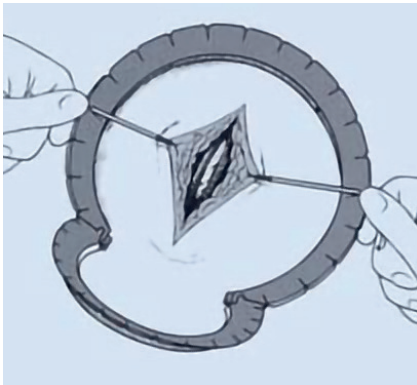


Der Retraktorring wird um die Inzision gelegt. Die Haken der elastischen Halter werden im Gewebe verankert und retrahiert (contralateral). Die dafür vorgesehenen Einkerbungen im Ring erleichtern die richtige Platzierung.

### Schritt 2

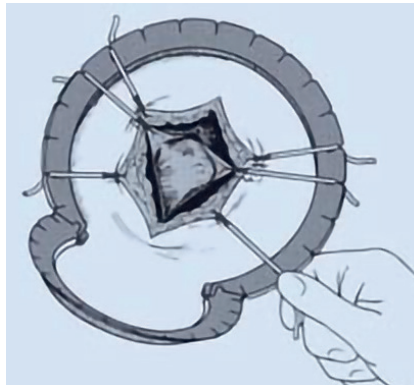

Während der OP können die Haken neu positioniert bzw. weitere Haken dazugenommen werden.

### Schritt 3

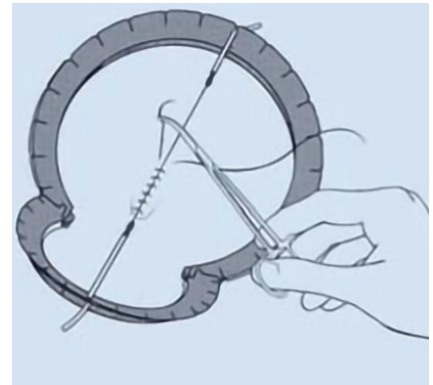




Beim Wundverschluss platziert man entlang der Achse des Einschnitts die elastischen Halter. Das erleichtert eine stabile Naht/Stapler-Linie.

## BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit
<b>Lone Star™ Einweg Kunststoff Retraktor-Ringe</b>		
3301G	Retraktor, steril, Kunststoff, 26,5 cm x 11,3 cm Einsatzgebiete: Gynäkologie, Kopf, Nacken	1 Stück
3302G	Retraktor, steril, Kunststoff, 25,8 cm x 11,3 cm Einsatzgebiete: Gynäkologie (v.a. schmales Becken)	1 Stück
3304G	Retraktor, steril, Kunststoff, 32,5 cm x 18,3 cm, inkl. 2 Katheter Clips Einsatzgebiete: Gynäkologie, Urologie (Männer)	1 Stück
3307G	Retraktor, steril, Kunststoff, 14,1 cm x 14,1 cm Einsatzgebiete: Colorektalchirurgie, offene Chirurgie, Kopf, Nacken	1 Stück



## BESTELLINFORMATION

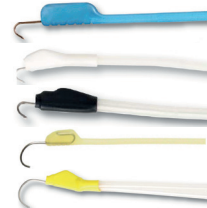Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	
<b>Lone Star™ Einweg Kunststoff Retraktor-Ringe</b>			
3308G	Retraktor, steril, Kunststoff, 28,6 cm x 18,3 cm, inkl. 2 Katheter Clips Einsatzgebiete: Gynäkologie, Urologie (Männer)	1 Stück	
3309G	Retraktor, steril, Kunststoff, 19,6 cm x 8,9 cm Einsatzgebiete: Kopf, Nacken, Pädiatrie	1 Stück	
3310G	Retraktor, steril, Kunststoff, 25 cm x 25 cm Einsatzgebiete: Offene Chirurgie, Kopf, Nacken	1 Stück	
3715	APS Retractor™, steril, Kunststoff, 16,6 cm x 16,2 cm, inkl. 2 Katheter Clips; Einsatzgebiet: Gynäkologie	1 Stück	
<b>Lone Star™ Einweg Elastische Halter Packs</b>			
3205-8G	PRO-Stay™, 5 mm, nicht metallisch	8 Stück	
3311-8G	Elastische Halter, 5 mm	8 Stück	
3314-8G	Elastische Halter, 3 mm	8 Stück	
3316-8G	Elastische Halter, 5 mm, stumpf	8 Stück	
3350-8G	Elastische Halter, 12 mm, stumpf	8 Stück	
3325-4G	2-Finger Elastische Halter, 5 mm	4 Stück	
3327-4G	2-Finger Elastische Halter, 7 mm	4 Stück	
3329-4G	2-Finger Elastische Halter, 10 mm	4 Stück	
3330-4G	Elastische Halter mit kleinem Haken, 13 mm, stumpfes Ende	4 Stück	
3332-4G	2-Finger Elastische Halter mit kleinem Haken, 14 mm, stumpfes Ende	4 Stück	
3334-4G	4-Finger Elastische Halter mit kleinem Haken, 20 mm, stumpfes Ende	4 Stück	
3338-4G	Elastische Halter mit kleinem Haken, 5 mm, stumpfes Ende,	4 Stück	
3331-4G	Spira™ Elastische Halter, 13 mm, stumpfes Ende	4 Stück	
3333-4G	2-Finger Spira™ Elastische Halter, 16 mm, stumpfes Ende	4 Stück	
3335-4G	3-Finger Spira™ Elastische Halter, 20 mm, stumpfes Ende	4 Stück	
3384-4	2-Finger Elastische Halter, 12 mm, stumpfes Ende	4 Stück	
3350L-4G	Elastische Halter, stumpfer Haken, 12 mm, langes Band	4 Stück	
<b>Lone Star™ Einweg Elastische Halter</b>			
3311-1G	Elastische Halter, 5 mm	50 Stück	
3314-1G	Elastische Halter, 3 mm	50 Stück	
3316-1G	Elastische Halter, 5 mm, stumpf	50 Stück	
3350-1G	Elastische Halter, 12 mm, stumpf	50 Stück	
3550-1G	Elastische Halter, 12 mm, stumpf, mit 2 Bändern	50 Stück	
<b>Lone Star™ Lone Star Retraktorsystem Procedure Kits</b>			
3707	<b>Colorektal Kit:</b> 1 Stk. 3307G (Retraktor, steril, Kunststoff, 14,1 cm x 14,1 cm), 1 Pkg. 3311-8G (Elastische Halter, 5 mm, 8 Stk.)	5 Kits	
3704	<b>Gynäkologie Kit:</b> 1 Stk. 3304G (Retraktor, steril, Kunststoff, 32,5 cm x 18,3 cm), 1 Pkg. 3311-8G (Elastische Halter, 5 mm, 8 Stk.)	5 Kits	