

# RUMI®II SYSTEM

## Flexibles System für die Uterusmanipulation

Das RUMI®II System kann für alle laparoskopischen Eingriffe im weiblichen Becken verwendet werden. Das verbesserte Design sorgt für einen noch leichteren Zugang zu den anatomischen Strukturen und die ideale Visualisierung. RUMI®II kann auch in der Roboterchirurgie eingesetzt werden.

### Entwickelt für die unterschiedlichsten Anforderungen.

RUMI®II ermöglicht die kontrollierte Manipulation des Uterus in alle Richtungen, inklusive 90°-Anteflexion und 50°-Retroflexion. Der Griff ist arretierbar, wodurch die Position des Instruments und auch die Spitze fixiert werden. Der Operateur kann - je nach Anatomie der Patientin - aus sechs verschiedenen Silikon-Spitzen wählen. Diese haben ein softes, flexibles Ende, um Perforationen oder Verletzungen des Uterus zu vermeiden. Der Ballon der Spitze wird mit Flüssigkeit gefüllt, sodass die Spitze stabil intrauterin positioniert werden kann. RUMI®II ist z.B. geeignet für diagnostische Laparoskopie, Myomektomie, Ovariektomie oder Endometriose-Entfernung.

### Koh-Efficient™ - mehr Sicherheit bei TLH

Bei der Totalen Laparoskopischen Hysterektomie liegt die größte Herausforderung darin, die Ureter und uterinen Arterien zu identifizieren und zu sichern. Die innovativen Koh-Efficient™ Aufsätze unterstützen den Operateur ideal: Sie werden auf das RUMI®II-System aufgesteckt und bilden eine optische und haptische Sicherheitsgrenze bei Dissektionen (Kolpotomie).

Die Koh-Efficient™ Aufsätze sind in 4 Größen erhältlich: Die passende Größe wird vorab mit dem Cervical Sizer individuell bestimmt. Das Aufsetzen auf das RUMI®II-System geht schnell und wird durch optische und akustische Indikatoren unterstützt.




### RUMI®II arretierbarer Griff



### Koh-Efficient™ Detailansicht



### Koh-Efficient™ Anwendung

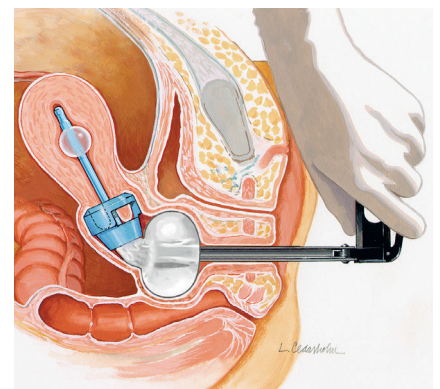

Bestellinformationen und weitere Details zu RUMI®II System und Koh-Efficient™ Aufsätzen - siehe Rückseite.

## BESTELLINFORMATION

Art. Nr.	Bezeichnung	Größe	VE
----------	-------------	-------	----

### RUMI®II-System Handgriffe

UMH650	RUMI®II Handgriff, wiederverwendbar		1
--------	-------------------------------------	--	---

### RUMI®II-System Spitzen

UMY514	RUMI®II Uterusmanipulator-Spitze gelb	5,1 mm x 3,75 cm	5
UML516	RUMI®II Uterusmanipulator-Spitze lila	5,1 mm x 6,0 cm	5
UMW676	RUMI®II Uterusmanipulator-Spitze weiß	6,7 mm x 6,0 cm	5
UMB678	RUMI®II Uterusmanipulator-Spitze blau	6,7 mm x 8,0 cm	5
UMG670	RUMI®II Uterusmanipulator-Spitze grün	6,7 mm x 10,0 cm	5
UMO672	RUMI®II Uterusmanipulator-Spitze orange	6,7 mm x 12,0 cm	5

### Sakrokolpopexie-Spitzen

SACRO-1	Sakrokolpopexie-Spitze large	3,8 cm x 11,4 cm	3
SACRO-1S	Sakrokolpopexie-Spitze small	3,2 cm x 9 cm	3
SACRO-1C	Sakrozervikopexie-Spitze konkav	3,8 cm x 11,4 cm	3

### Cervix Sizer

KC-SIZER	RUMI®II Koh-Efficient Sizer, wiederverwendbar		1
----------	---	--	---


### RUMI®II Koh-Efficient System für Elektrochirurgie

KC-RUMI-25	RUMI®II Koh-Efficient	2,5 cm	5
KC-RUMI-30	RUMI®II Koh-Efficient	3,0 cm	5
KC-RUMI-35	RUMI®II Koh-Efficient	3,5 cm	5
KC-RUMI-40	RUMI®II Koh-Efficient	4,0 cm	5

### RUMI®II Koh-Efficient System für Ultraschall / Laser

KCS-RUMI-25	RUMI®II Koh-Efficient	2,5 cm	5
KCS-RUMI-30	RUMI®II Koh-Efficient	3,0 cm	5
KCS-RUMI-35	RUMI®II Koh-Efficient	3,5 cm	5
KCS-RUMI-40	RUMI®II Koh-Efficient	4,0 cm	5

### RUMI®II Silikon-Spitzen in 6 Größen

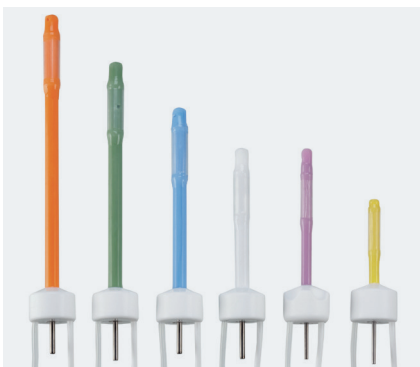

### RUMI®II Sakrokolpopexie Spitzen



### RUMI®II / Koh-Efficient™ Produktvideo

